

## PUNTAS AUTOMÁTICAS FUJI DRI-CHEM

20120801ES

**[Advertencias y precauciones]**

1. No reutilizar.
2. No toque los extremos de las puntas. Puede provocar daños en el elemento hidrófugo
3. No tocar las puntas con otros productos. Puede provocar la contaminación del material hidrófugo.
4. No utilizar cualquier punta que caiga al suelo, ya que podría estar contaminada.

**[Uso previsto]**

Este producto se utiliza al pipetear muestras tales como sangre completa, plasma, suero y suero de control para el sistema FUJI DRI-CHEM.

**[Limitaciones de uso]**

Este producto está especialmente diseñado para el sistema FUJI DRI-CHEM. No puede aplicarse a otros sistemas.

**[Composición]**

Tubo: Polipropileno

Elemento hidrófugo: Resina de silicona

**[Procedimiento]**

Consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" del FUJI DRI-CHEM ANALYZER.

**[Información de desecho]**

Las puntas usadas se clasifican como residuos infecciosos. Asegúrese de desecharlas de acuerdo con la Normativa de desecho de residuos y otras normativas aplicables, la cuales indican el método apropiado de desecho, como por ejemplo la incineración, fusión, esterilización o desinfección.

**[Almacenamiento y manipulación]**

1. No almacenar a altas temperaturas para evitar la deformación.
2. Este producto no permite el tratamiento en autoclave antes del uso.

**[Contenido]**

96 puntas × 6



Consulte el "MANUAL DE INSTRUCCIONES" para FUJI DRI-CHEM ANALYZER o <http://www.fujifilm.com/products/medical/>



FUJIFILM Europe GmbH  
Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, ALEMANIA



FUJIFILM Corporation  
26-30, Nishiazabu 2-Chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620, JAPÓN



No reutilizar



Número de lote



Fabricante



Representante autorizado en la Comunidad Europea



Contiene suficiente para <n> pruebas



Productos sanitarios de diagnóstico in vitro



Consultar las instrucciones de uso