



Clinical Diagnostic Solutions, Inc.

1800 NW 65th Avenue Plantation, Florida 33313 USA
Telephone: 954.791.1773 * Facsimile: 954.791.7118 * www.cdsolinc.com
Consultative Services * Diagnostic Products * Customer Support

LYTIC REAGENT-MYTHIC

MYTHIC Reactivo Lisante (INSERTO)

| | |
|--|--|
| Número del Producto: | 501-035 |
| Descripción del Producto: | Reactivo para lisar el estroma de los eritrocitos que permite una cuantificación exacta de leucocitos y para convertir la hemoglobina liberada por una medición cuantitativa en los Sistemas de Análisis Hematológico |
| Ingredientes Activos: | Compuestos de monio cuaternario < 35 g/L ó < 3.5 % Cianuro de Potasio < 0.5 g/L ó < 0.06 % |
| Preservantes: | El Mythic Reactivo Lisante contiene buffers, sales y sustancias antimicrobianas para prevenir la contaminación de mohos y bacterias. Estas sustancias son biodegradables. |
| Estabilidad: | 36 meses a partir de la fecha de producción. La vida útil de este producto está basada en los estudios de estabilidad de aceleradores y tiempo real. Desechar el producto a los 60 días después de haberse abierto. |
| Almacenamiento: | 4-30 °C (40 a 86 °F). Evitar congelar. |
| Embalaje: | Recipiente plástico conteniendo 950 mL |
| Advertencias y Precauciones: | No contiene ingredientes peligrosos > 1% del volumen de concentración. Evitar contacto con piel, ojos y ropa. Mantener alejado de productos alimenticios. Si se ingiere consulte a un médico. Si el paciente está consciente, darle agua tibia con sal o cualquier emético hasta que el vómito esté claro. El contacto con ácido libera un gas venenoso. Evitar inhalar el gas. Es peligroso al ingerirse. Utilizar buenas prácticas de laboratorio. |
| Instrucciones de uso: | Utilizarse con Sistemas MYTHIC de Análisis Hematológico capaces de reportar recuentos diferenciales de leucocitos (WBC) de tres o cinco partes. Utilizar este producto introduciendo la cánula correspondiente del equipo dentro de este recipiente. |
| Especificaciones de Control de Calidad: | |

| Test | Especificaciones |
|-----------------------|---------------------------|
| pH | 9.6 ± 0.50 |
| Osmolaridad (mOsm/kg) | 380 ± 30 |
| Conductividad (mS/cm) | 4.725 ± 0.775 |
| Apariencia | Limpido, líquido incoloro |

*Los tests de rendimiento utilizan contadores hematológicos calibrados en el laboratorio de referencia de Clinical Diagnostic Solutions.
Referencia aceptada del 95% a 105% de los valores esperados de muestras control sanguíneas.

| | |
|----------------------------------|--|
| Conformidad del Producto: | Mythic Reactivo Lisante está de conformidad con 98/79/EC <i>In Vitro Diagnostic Medical Device Directive (IVD)</i> utilizando el ANNEX III como el procedimiento de valoración de conformidad. |
|----------------------------------|--|